

FICHE TECHNIQUE



Explication :	Les verres sont fabriqués dans un large éventail de revêtements qui permettent d'éviter les rayures, les reflets, la graisse, l'humidité, etc. Tout pour offrir aux utilisateurs un meilleur confort visuel. Inconvénient : il est difficile d'y fixer une pastille de fixation.	
Description Produit:	Cette pastille d'application de débordage du verre a un support en mousse fabriqué en matière PE de très haute densité qui possède une résistance à la torsion axiale du verre la plus élevée jamais atteinte. Cet adhésif hybride unique évitera les glissements/dérappages comme jamais auparavant. C'est pourquoi la pastille est utilisable sur tous les verres à revêtements standards et quasiment sur n'importe quel verre difficile à fixer Super et Ultra hydrophobique. Elle peut même être utilisée sur des verres difficiles à coller provenant d'entreprises asiatiques. Le papier sur le haut évite toute charge statique gênante.	
Utilisation :	Le côté du verre est indiqué par une languette dorée. Le côté bloqué est indiqué par une languette rouge. Cette pastille convient à quasiment n'importe quel verre, à l'exception des verres sans revêtement. Vous pourriez dire qu'il s'agit de la meilleure et, en outre, de notre première pastille qui convient à (quasiment) tout les verres.	
Propriétés physiques:	Adhésif:	Hybride très agressif
	Support :	Mousse PE à cellule fermée conformable
	Epaisseur totale :	0,9 mm
	Rouleau protection (liner) manuel:	Haut, papier imprimé cristal blanc. Bas, papier non imprimé cristal blanc.
	Rouleau protection (liner) machine:	Haut, film PE bleu translucide. Bas, film PET transparent.
	Température :	+80°C
	Durée de conservation :	12 mois à partir de l'expédition en cas de conservation dans les sacs d'origine et des cartons à 18-22°C et à moins de 30-70% d'humidité relative, à l'abri du soleil direct et des UV et dans l'emballage d'origine.

Data and details in this sheet were correct and up-to-date at the time of printing and are intended to provide information on our products and their possible applications. This sheet is not a specification and does not assure specific product characteristics or make reference to the suitability of the products for a definite application. Because Permanento cannot anticipate or control every application, we strongly recommend testing of this product under individual application conditions. In accordance with our policy of continuous improvement specification may vary

Permanento Edge-it B.V.
Bliet 10
Industrial Estate Dombosch 1
4941 SG Raamsdonksveer
The Netherlands
Tel: +31 162 58 94 00
Fax: +31 162 52 02 14
r.hertzberger@permanento.com
w.kraaij@permanento.com